

ONEMED DISPOSABLE SYRINGE

ONEMED Disposable Syringe merupakan alat suntik sekali pakai yang dirancang untuk mendukung prosedur medis yang aman, steril, dan akurat. Diproduksi dari bahan berkualitas serta melalui proses sterilisasi yang terstandarisasi, produk ini membantu meminimalkan risiko kontaminasi sekaligus memberikan kenyamanan bagi tenaga medis dalam penggunaan sehari-hari. Tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, baik dengan maupun tanpa jarum, serta pilihan tipe konektor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan klinis dan medis yang beragam.

Keunggulan

- Sterile
- Sekali pakai – Dirancang sekali pakai untuk mencegah risiko kontaminasi silang
- Non-Toxic & Non-Pyrogenic
- Tersedia dalam berbagai tipe konektor : luer slip, luer lock, catheter tip and eccentric tip

Informasi Teknis

- Bahan: Polipropilen & Silicone Medical Grade
- Metode Sterilisasi: Ethylene Oxide (EO)
- Kemasan: Blister
- Produksi: PT. Jayamas Medica Industri Tbk

Petunjuk Penggunaan

- Eratkan jarum dengan barrel syringe, putar searah jarum jam.
- Tarik tutup jarum, syringe siap digunakan.

Peringatan

Untuk menghindari infeksi silang karena tusukan yang tidak disengaja:

1. Alat suntik yang sudah dipakai jangan ditutup ulang.
2. Buang alat suntik bekas, beserta jarum dan tutupnya ketempat pembuangan sampah medis (sharp container/safety box).
3. Jika needle terpaksa harus ditutup ulang, letakkan tutup diatas meja kemudian masukkan jarum (tanpa harus memegang tutup). Setelah jarum tertutup, eratkan tutup sampai terkunci.
4. Ikuti prosedur yang benar untuk penanganan benda-benda tajam dengan aman.
5. Periksa keutuhan kemasan secara seksama dan baca cara pemakaian sebelum menggunakan alat tersebut.

Plant Krian, Sidoarjo

Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian,
Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
☎ +62.31.8982349 / +62.31.8985269

Plant Mojoagung, Jombang

Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Karangwinongan,
Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia
☎ +62.321.4890907

Website :

www.onemed.co.id

E-mail :

onemed@onemed.co.id



ISO 13485 : 2014
Cert No : 01 05 B 24000134

Spesifikasi



OneMed Disposable Syringe with needle

Volume (mL)	Needle Size	Tip Type
1	26G x 1/2"	Luer Slip
1	27G x 1/2"	Luer Slip
2,5 dan 3	23G x 1 1/4"	Luer Lock
3, 5	18G x 1 1/4"	Luer Lock
5	22G x 1 1/2"	Luer Lock
10	21G x 1 1/2"	Luer Lock



OneMed Disposable Syringe without needle

Volume (mL)	Tip Type
3, 5, 10, 20, 50	Luer Lock
20, 50	Luer Slip
50	Catheter Tip

Plant Krian, Sidoarjo

Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian,
Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
+62.31.8982349 / +62.31.8985269

Plant Mojoagung, Jombang

Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Karangwinongan,
Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia
+62.321.4890907

Website :

www.onemed.co.id

E-mail :

onemed@onemed.co.id



ISO 13485 : 2016
Cert No : 01 05 B 24000134